

Setzt neue Massstäbe in der Hautbehandlung!



Peeling & Tiefenreinigung



Skin Vital entfernt effizient und schmerzfrei die abgestorbenen Zellen der Hornschicht und aktiviert die Zellregeneration. Die Haut wirkt sofort glatter, straffer und jünger. Unreinheiten werden beseitigt und das Gesicht gewinnt an neuer Ausstrahlung.

Die Haut ist nun in einem perfekt vorbereiteten Zustand, um Wirkstoffe aufzunehmen.

Durch die applizierten elastischen Wellen kommt es zu folgenden positiven Effekten:

- Abtragung der obersten verhornten Hautschicht (abgestorbene Zellen, Talg, Make-up-Reste, etc.)
- Steigerung der Nährstoffversorgung der obersten Hautschicht und der darunter liegenden Zellen
- Anregung der Zellerneuerung
- Egalisierung des Hautteints

Bereits nach der ersten Behandlung ist die erstaunliche Wirkung sicht- und fühlbar.



Wirkmechanismus

Die Spitze des Schwingers wird durch piezoelektrische Kräfte angeregt und in Schwingungen versetzt. Die so erzeugten elastischen Wellen zerstäuben die aufgetragene Peeling-Lotion und sorgen, dank des erzeugten Hohlso-ffektes (Kavitation), für die Herauslösung der Partikel.

Tiefendurchfeuchtung und Einschleusen von Wirkstoffen



Das Durchfeuchten und Einschleusen von Wirkstoffen sind sehr wichtige Funktionen des Skin Vital. Nach dem Peelingvorgang und der Tiefendurchfeuchtung ist die Haut optimal für die Wirkstoffaufnahme vorbereitet.

Die Steigerung der Permeabilität der Hornschicht ermöglicht die Aufnahme der Produkte. Wenn man sich die Hornschicht als winzige Ziegel vorstellt, so nehmen die Lipide der Hornschicht, die Funktion des Mörtels ein, welcher die Zwischenräume ausfüllt. Die Energie, die von der Schwingwelle ausgeht, lockert die Mörtelmasse und schafft Zwischenräume, durch die die Wirkstoffe eindringen können.

Die Wirksamkeit und die Menge der eingeschleusten Produkte wird dadurch erheblich gesteigert.

Die modulierten elastischen Wellen erzeugen:

- eine Zerstäubung der Flüssigkeit, die sich auf der Haut befindet
- ein Eindringen der mikroskopisch kleinen Flüssigkeitstropfen in die Haut und damit verbunden eine nachhaltige Wirkung
- ein Zusammendrücken und Entspannen der Haut, was einer Mikromassage gleich kommt und die Wirkstoffaufnahme gleichzeitig fördert.

Der Skin Vital ist das erste in Deutschland entwickelte und hergestellte Gerät, das diese bahnbrechende Technologie einsetzt.



Wirkmechanismus

Wenn die Haut niederfrequenten Ultraschallwellen ausgesetzt wird, findet in den obersten Hautstrukturen eine Kavitation statt. Diese führt dazu, dass sich zwischen den Hornzellen Hohlräume bilden. Durch die leichte Erwärmung wird die Ausdehnung des interzellulären Zwischenraums verstärkt und ermöglicht somit das leichtere Eindringen von Wirkstoffen.

Vitalisierung



Um der Hautalterung entgegenzuwirken wird das Vitalisierungsprogramm angewendet. Es ist eine weltweit einzigartige Kombination von niederfrequenten Ultraschallwellen und mittelfrequenten Mikroströmen. Dies bewirkt eine erhöhte Fibroblastenaktivität, was zu einer besseren Kollagen- und Elastinstruktur führt.

Die Behandlungsmethode verstärkt zudem die Mikrozirkulation, die ihrerseits all jene Prozesse beschleunigt, die zur Hautregeneration beitragen. Das Wasserrückhaltevermögen in den tieferen Hautschichten wird verbessert.

Die Kombinationsbehandlung Schwinger-Mikrostrom erzielt folgende Wirkungen:

- Neusynthese von Kollagen und Elastin (Fibroblastenanregung)
- Erhöhung des Muskeltonus (Lifting-Effekt)
- Anregung des Stoffwechsels im Sinne einer Regeneration
- Erhöhung der Durchblutung und Steigerung des Lymphflusses

Bei der Microstrom-Behandlung mit Rollelektroden können folgende Ergebnisse erzielt werden:

- Erhöhung der Durchblutung
- Steigerung der Regeneration
- Erhöhung des Muskeltonus
- Abtransport der Schlackenstoffe durch die Lymphe



Wirkmechanismus

Durch die weltweit einzigartige Kombination von niederfrequenten Ultraschallwellen und mittelfrequenten Mikroströmen wird die Fibroblastenaktivität erhöht und die körpereigene Regeneration aktiviert. Die Durchblutung wird verbessert und der Lymphfluss gesteigert.

Faltenbehandlung



Um die Falten wirkungsvoll zu behandeln wird ein Nadel-Mikrostrom-Licht-Handstück eingesetzt. Dadurch wird direkt auf die Faltenfurchen eingewirkt.

Durch die Kombination Nadel-Mikrostrom-Licht wird eine Art Gewebereiz erzeugt. Dieser reagiert mit einer Gewebereaktion und bewirkt eine Aufpolsterung und Glättung der Falten. Zusätzlich werden lokal die Fibroblasten stimuliert, was die Kollagen- und Elastinproduktion verbessert.

Mit dieser Methode werden drei Wirkmechanismen kombiniert um Falten zu behandeln:

- Die Nadelspitzen stimulieren die Haut bis zur Muskelschicht und bewirken eine Aufpolsterung
- Der Mikrostrom aktiviert und liefert elektrische Energie, die teilweise in Wärme umgewandelt wird
- Das monochromatische Licht fügt Foto-Bioenergie für die ATP-Produktion zu (Zellkraftstoff).



Wirkmechanismus

Die effiziente Kombination von Nadel- Mikrostrom-Licht, bewirkt eine Aufpolsterung und Glättung der Faltenfurchen, eine lokale Aktivierung der Kollagen- und Elastinproduktion sowie eine Steigerung der ATP-Syntese (ATP steht für Adenosin-Tri-Phosphat und stellt den Kraftstoff, Ladeakkus, in den Zellen dar).

Der Quantensprung in der modernen Kosmetik




Skin Vital, das Einknopf-Genie für die einzigartige Behandlung von Gesicht, Hals und Dekolleté. Seine Anwendungsmöglichkeiten sind so vielfältig, dass sie das gesamte Behandlungsspektrum abdecken wie:

- Peeling
- Tiefendurchfeuchtung
- Einschleusen von Wirkstoffen
- Vitalisierung und Straffung von müder und älterer Haut
- Faltenbehandlung

Das Skin Vital Paket besteht aus:

- Skin Vital Gerät
- Handstück (Schwinger)
- Nadel-Mikrostrom-Licht-Elektrode
- Handstück zur Applikation von EVM-Mikroströmen
- Gegenelektrode
- Design-Gerätewagen (optional)

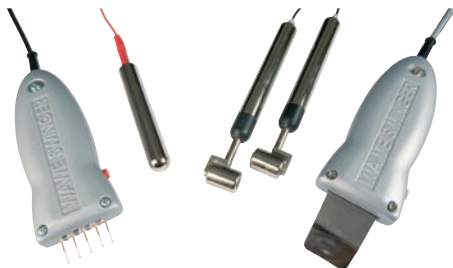

Technische Angaben

Netzanschluss: 230 V \pm 10%

Leistung: 110 VA

Abmessungen: 38 x 33 x 15 cm (L x B x H)

Gewicht: 5 Kg

Sicherungen: T1A

Schwinger: Frequenz 30'000 Hz \pm 10%

Mikrostrom: Wechselstrom = Trägerfrequenz 4000 Hz
moduliert mit 50 Hz

Gleichstrom = 4000 Hz moduliert

Lichtquelle: Monochromatische Dioden 4 Stück,
4 X 80 mW (Wellenlänge: 630 nm)

Setzen auch Sie neue Masstäbe und heben Sie sich von Ihrer Konkurrenz ab.