

DIE VERSCHIEDENEN BEHANDLUNGS-KITS

BALANCE | ILLUMINATE | REVIVE | HYDRATE | DETOX | GLAM

Innovative und einzigartige Behandlungsprotokolle

4 BEHANDLUNGS-SCHRITTE

1. OXYGENATION

Sauerstoffaufnahme der Haut

2. EXFOLIATION

Intensivpeeling und Tiefenreinigung der Haut

3. ABSORPTION

Wirkstoffaufnahme

4. RELAXATION

Lässt die Haut neu erstrahlen

1 - 3

OXYPOD + PRIMER GEL

Der geneo OxyPod umschließt die Wirkstoffe in ihrem trockenen und suspendierten Zustand und aktiviert sie erst in Verbindung mit dem speziell formulierten Primer-Gel. Der OxyPod-Wirkmechanismus bietet einen einzigartigen Dreifach-Effekt aus Aktivierung der Sauerstoffversorgung in der Haut, Tiefenpeeling und intensive Aufnahme von Wirkstoffen.

3 - 4

SERUM

Das geneo Serum vervollständigt die Behandlung durch seine auserlesenen Wirkstoffe, welche auf die verschiedenen Hautbedürfnisse abgestimmt sind und das Resultat der OxyPod-Behandlung verstärken.

GENEO BALANCE

GESICHTSBEHANDLUNG FÜR FETTIGE, UNREINE HAUT

Eine äusserst wirksame Kombination von reinigenden, beruhigenden und talgabsorbierenden Inhaltsstoffen, um fettige Haut zu klären, auszugleichen und ihre Textur und ihr Aussehen zu verbessern.

BALANCING OXYPOD · Bambus-Kohle - Mandelsäure - Camu Camu-Extrakt

BALANCING SERUM · Salizylsäure- Oligopeptide - Öl- und Pflanzenextrakt-Komplex

GENEO ILLUMINATE

GESICHTSBEHANDLUNG FÜR EIN STRAHLENDES, AUFGEHELLTES HAUTBILD

Eine einzigartige Kombination aus ausgleichenden, schützenden und beruhigenden Inhaltsstoffen, zur Egalisierung des Hautttons, Verbesserung des Erscheinungsbildes und für ein strahlendes Hautbild.

ILLUMINATING OXYPOD · Kojisäure - Stabilisiertes Vitamin C - Opuntia-Fruchtextrakt und Karottenextrakt

ILLUMINATING SERUM · Aminosäuren-Derivate - Boldinrindenextrakt - Öl- und Pflanzenextrakt-Komplex

GENEO REVIVE

GESICHTSBEHANDLUNG GEGEN ZEICHEN DER HAUTALTERUNG

Eine leistungsstarke Kombination aus nährenden, schützenden und verjüngenden Inhaltsstoffen, zur Revitalisierung von fahler Haut, Reduzierung von Fältchen und zur Straffung der Haut.

REVIVING OXYPOD · Rotalge - Retinol - Kaffeesäure

REVIVING SERUM · Peptide - Edelweiss - Öl- und Pflanzenextrakt-Komplex

GENEO DETOX

GESICHTSBEHANDLUNG ZUR JUNGERHALTUNG DER HAUT

Jüngere Haut sollte gut behandelt werden, um ihre Frische und Widerstandsfähigkeit auf Dauer zu erhalten. Mit einer Kombination aus entgiftenden, schützenden und klärenden Inhaltsstoffen stärkt geneo Detox die Schutzbarrieren der Haut gegen Toxine und Umweltverschmutzung, fördert ein ausgeglicheneres Hautbild und unterstützt ihre Jungerhaltung.

DETOXIFYING OXYPOD · Grüntee - Kupfer-Glukonat

DETOXIFYING SERUM · Allantoin - weiße Wasserlilie - Marula-Öl und Gorgonien-Extrakt

GENEO HYDRATE

GESICHTSBEHANDLUNG BEI TROCKENER HAUT

Eine einzigartige Kombination aus hochwertigen Inhaltsstoffen, die darauf abzielen, trockene und feuchtigkeitsarme Haut zu erfrischen, zu hydratisieren und zu schützen. Mit wirksamen, regenerierenden, antioxidativen, hautpflegenden und stärkenden Wirkstoffen findet die Haut zu neuer Vitalität und Strahlkraft.

HYDRATING OXYPOD · Blaue Spirulina - Lactobionsäure - Vitamin B3

HYDRATING SERUM · 3D Feuchtigkeits-Komplex - Hyaluronsäure - Öl- und Pflanzenextrakt-Komplex

GENEO GLAM - DIE LUXUSBEHANDLUNG

GESICHTSBEHANDLUNG ZUR STRAFFUNG DER HAUT

Verwöhnt die reifere Haut, strafft sie und verleiht ihr eine neue Strahlkraft. Wertvollste Inhaltsstoffe sorgen zudem für optimale Feuchtigkeitsversorgung und Stärkung.

GLAM OXYPOD · Gold Flakes (reines Gold)

- Aminosäuren aus Seide - Carnosin-Peptid
GLAM SERUM · Hyaluronsäure - Hagenbutteröl - Marulaöl - PhytoSpherix

EMPFOHLENER BEHANDLUNGSABLAUF

1. Reinigen Sie den Behandlungsbereich gründlich und trocknen Sie ihn ab (stellen Sie sicher, dass alles Make-up entfernt wurde)
2. Befestigen Sie eine neue OxyPod-Einwegkapsel am OxyGeneo-Applikator
3. Tragen Sie den Primer-Gel auf den Behandlungsbereich auf. Hinweis: Es kann ein Kribbeln zu spüren sein
4. Wählen Sie die OxyGeneo-Behandlung aus und stellen Sie die Parameter ein
5. Um die Behandlung zu beginnen, drücken Sie PLAY auf dem Bildschirm und die START-Taste am Applikator
6. Bewegen Sie den Applikator mit kreisenden oder linearen Bewegungen und üben Sie dabei leichten Druck auf die gesamte Fläche aus. Vermeiden Sie den Kontakt mit den Augen und dem Mund
7. Im behandelten Bereich entstehen Sauerstoffbläschen - lassen Sie diese einen Moment auf der Haut verweilen, um ein noch besseres Ergebnis zu erzielen
8. Nach etwa 2 Minuten wird der OxyPod etwas körniger. Je nach Kundenfeedback reduzieren Sie etwas die Druckintensität
9. Ein Alarm ertönt eine Minute vor dem Ende der Sitzung und erneut am Ende der Sitzung
10. Entfernen Sie den Gel und reinigen Sie den Behandlungsbereich
11. Entfernen Sie den OxyPod und entsorgen Sie ihn
12. Tragen Sie das Serum auf die behandelte Stelle auf
13. Wählen Sie die Ultraschallbehandlung und passen Sie bei Bedarf die Parameter an
14. Um die Behandlung zu beginnen, drücken Sie PLAY auf dem Bildschirm und die START-Taste am Applikator
15. Führen Sie langsame, kreisförmige oder lineare Bewegungen mit dem Applikator aus
16. Ein Alarm ertönt eine Minute vor dem Ende der Sitzung und erneut am Ende der Sitzung
17. Bei Bedarf restliches Serum noch manuell einmassieren, bis es vollständig eingezogen ist. Überreste mit feuchter Wattenrondelle entfernen

Für eine Kur werden 6-8 geneo Behandlungen alle 2-3 Wochen empfohlen.

Um das Resultat zu erhalten: 1 Behandlung alle 6-8 Wochen.